

Guía rápida de operación del Equipo LUCIA de desinfección de máscaras N95

Advertencia: Este documento expone los principales pasos a seguir para una correcta operación del equipo LUCIA, no pretende ser un sustituto del Manual, el cual debe ser estudiado por todos los usuarios del equipo.

Pasos a seguir


1. Retirar el soporte de las mascarillas con el equipo apagado.
2. Estando el equipo vacío, se enciende y comienza el proceso de calibración. El estado de calibración y el tiempo restante para su finalización se indican en el display.



3. Una vez finalizada la calibración, el display indica la ausencia de carga.



4. Colocar las mascarillas en el soporte, teniendo las precauciones expuestas en el manual de usuario, e ingresar el soporte en el equipo.

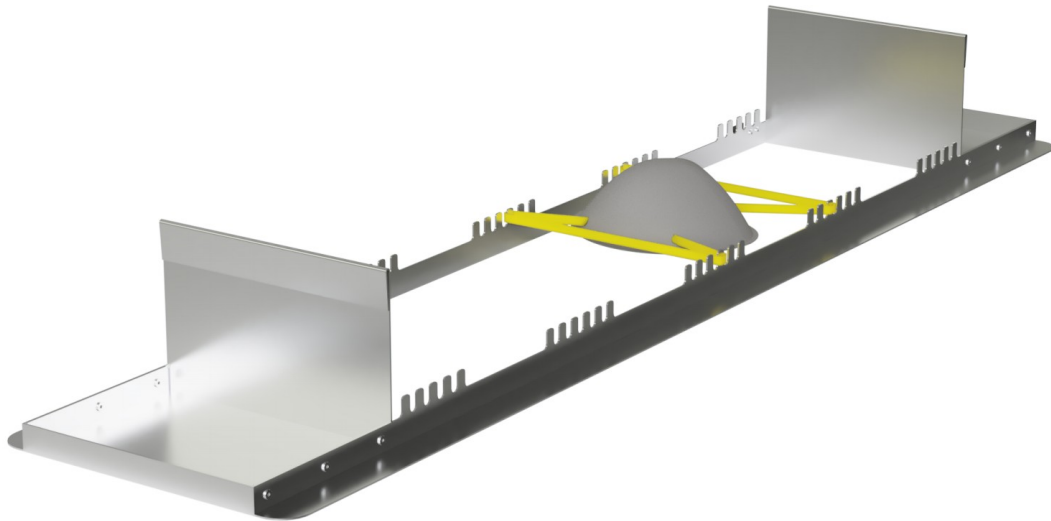

5. El soporte y las puertas del equipo cuentan con indicadores de la correcta orientación. Una vez que el soporte está colocado correctamente, el equipo emitirá un sonido y el display señalará que la puerta está abierta.
6. Estando el soporte colocado y las puertas cerradas, el display indicará la potencia de la luz UVC y un tiempo restante de 0 s. A su vez, las luces del equipo se tornarán verdes.



7. Al apretar el botón de inicio, se da comienzo a la desinfección. El display comienza una cuenta regresiva y la luz pasa a color rojo parpadeante.



8. Al finalizar la desinfección, se muestra este estado en el display, la luz pasa a color verde y el equipo emite un sonido que se podrá interrumpir apretando el botón o abriendo alguna de las puertas.



9. Al remover la bandeja el equipo estará en condiciones de realizar una nueva desinfección.

Nota: Si se detecta un proceso anómalo se recomienda reiniciar el equipo.